



### IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing Anwendung

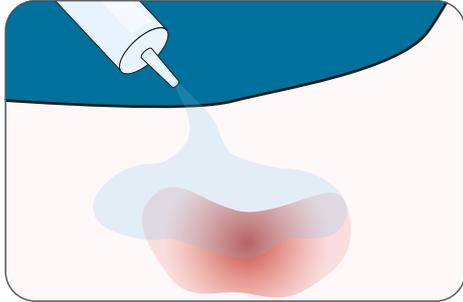

Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung gründlich die Hände.

Verwenden Sie sterile Handschuhe und reinigen Sie die Wunde und die Wundumgebung entweder mit Wasser- oder Kochsalzlösung.


**Die Wundoberfläche NICHT ABTROCKNEN.**

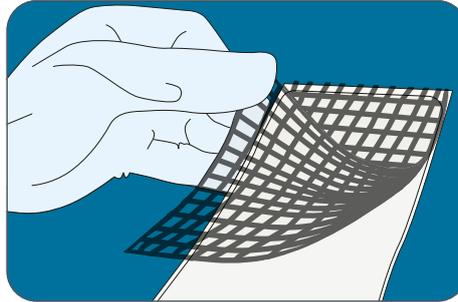

Entfernen Sie die Netzstruktur auf beiden Seiten des Dressings.

Modellieren Sie das Dressing entsprechend der Wundgröße.


Eventuell verbleibende Reste von IODOSORB<sup>◊</sup> müssen wegen des Verlusts der Sterilität entsorgt werden.

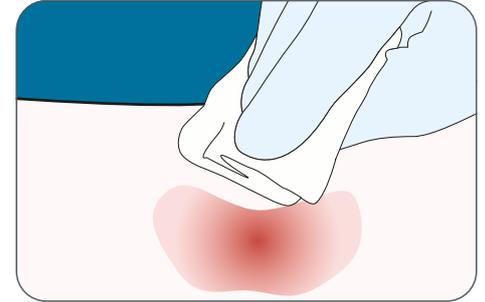

Decken Sie die Wunde vollständig mit einem geeigneten Sekundärverband ab (z. B. ALLEVYN<sup>◊</sup> LIFE).

Legen Sie wenn notwendig einen Kompressionsverband an.


### IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing wechseln

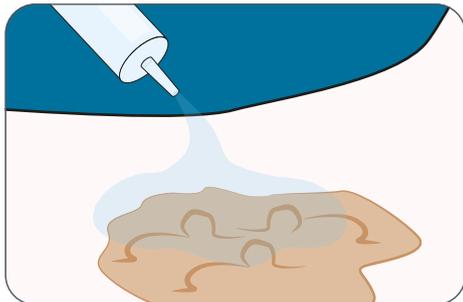

IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing sollte gewechselt werden, wenn es mit Wundsekret durchtränkt ist und wenn das Iod vollständig freigesetzt wurde.

Zu erkennen ist das am Verblasen der Farbe.


Wenn die Wunde stark nässt, kann ein täglicher Verbandwechsel notwendig sein.

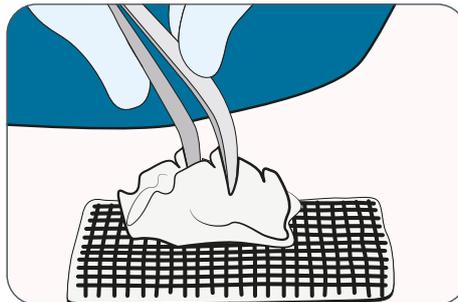

Verband gegebenenfalls einige Minuten durchtränken und dann entfernen.



IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing vorsichtig unter Verwendung von Wasser- oder Kochsalzlösung entfernen.

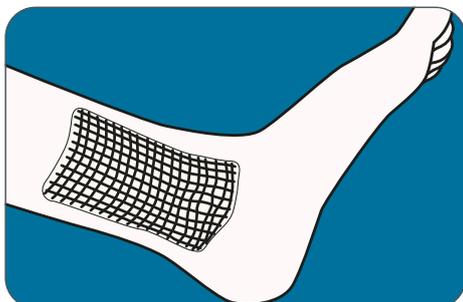

Vor dem erneuten Auftragen von IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing überschüssige Flüssigkeit vorsichtig abtupfen und die Wundoberfläche etwas feucht belassen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Die einmalige Anwendung von IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing sollte 50 g (entspricht 5x 10g Sterilverpackung) nicht überschreiten und es dürfen in einer Woche nicht mehr als 150 g (entspricht 15x 10g Sterilverpackung) angewendet werden.
- IODOSORB<sup>◊</sup> Dressing darf nicht auf trockenem nekrotischem Gewebe oder bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Iod oder einen der anderen Inhaltsstoffe angewendet werden.
- Die Dauer der Behandlung darf nicht länger als 3 Monate betragen.

Für detaillierte Produktinformationen, einschließlich Indikationen für den Gebrauch, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und wichtige Sicherheitsinformationen konsultieren Sie bitte immer die Gebrauchsanweisung (IFU) des jeweiligen Produkts, bevor Sie es verwenden