



optiLubeTM

sterile lubricating jelly

CE 0086



STERILE R

OMS-IFU-JUL17-V9.0



optimummedical®



Optimum Medical Solutions Ltd

Floor 1, Unit 5 Armley Court, Armley
Road, Leeds, LS12 2LB, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479,

enquiries@optimummedical.co.uk

www.optimummedical.co.uk

GEBRAUCHS- INFORMATIONEN

MARKE: OptiLube

ZUSAMMENSETZUNG:

Steriles, transparentes und wasserlösliches Gel.

- Gereinigtes Wasser • PEG • Glycerin
- Natriumhydroxid • 4-Hydroxybenzoesäureester

EMPFOHLENE VERWENDUNG:

OptiLube ist ein wasserlösliches steriles Gleitgel für die leichte Einführung medizinischer Geräte bei folgenden Anwendungen:

- Einführen von Kathetern • Endoskopie
- Gynäkologische Untersuchungen • Rektaluntersuchungen • Zystoskopien

OptiLube ist unbedenklich für das menschliche Gewebe.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

BEUTEL: Vor der Anwendung den Beutel aus dem Karton holen und an einer Ecke einreißen. Der **OptiLube** 20g-Beutel ist doppelt verpackt und sollte nur unter sterilen Bedingungen wie oben angeführt geöffnet werden. Nur für den Einmalgebrauch.

TUBEN: Den Deckel abschrauben und die Folie vom Tubenhals entfernen. Das sterile **OptiLube** Gleitgel auf das Untersuchungsinstrument oder die Haut auftragen und nach dem Gebrauch wieder verschließen. Nach dem Öffnen innerhalb von drei Monaten aufbrauchen.

VORSICHTSMAßNAHMEN: Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verschlossen ist. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen von **OptiLube**. Beim Auftreten einer Reizung die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Unzulänglich für Kinder aufbewahren. Sterilität ist nur bis zum Öffnen des Produkts gewährleistet.

GRÖßEN:

Tuben: 5g, 10g, 42g, 82g, 113g

Beutel: 2,7g, 5g, 20g

