



RUDASPRAY®

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Sprühkleber zur Verbesserung der Lagenfixierung von Binden, Verbänden und Tapes.

RUDASPRAY® ist FCKW-frei.

Zusammensetzung

Propan, Butan, Spezialbenzin, Aceton, Polymer, DINP, Farbstoff

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDASPRAY® ist Hilfsmittel für Medizinprodukte nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1 Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Nicht im Bereich der Augen und Haut oder Schleimhäute einsetzen! Bei Anwendung auf der Haut kann diese spröde oder rissig werden. Flecken auf Kleidern oder der Haut mit Alkohol entfernen. Keine Lösungsmittel verwenden. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dosen mit Restinhalt der Problemabfallsorgung zuführen. Enthält Isobuthylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Extrem entzündbares Gas. Verursacht schwere Augenreizungen. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweis: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Verpackung

Primärverpackung: Sprühdose
Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

