


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

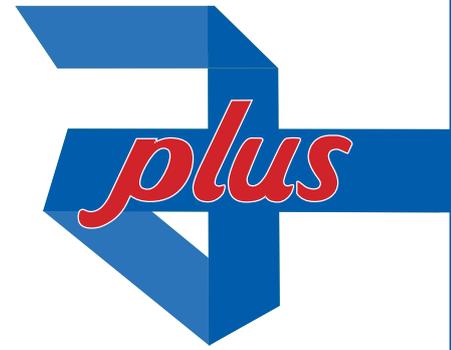

MyClean® Wipes premium Trockene Vliestuchrollen

- Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem
- Mit Lochung für optimales Tränkverhalten

Anwendung: MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5 - 2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für: MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-Felder-Test), MyClean® DS A.

Ausführungen: MyClean® Wipes premium

| Artikelbeschreibung | Größe | Pack.-Inhalt | Art.Nr. / REF | EAN | PZN | Pack / VE |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Vliestuchrolle, trocken, premium L | 15 x 30 cm | 140 Blatt | 179627 | 4046153116515 | 10305982 | 8 |
| Vliestuchrolle, trocken, premium XXL | 29 x 30 cm | 90 Blatt | 179629 | 4046153116492 | 10305976 | 8 |

Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, fertigen Gebrauchslösung

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit: Maximal 28 Tage (fertige Gebrauchslösung)

Symbole:   



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-Wipes-premium-20190304