



DE

FLEXIBLE LIPIDOKOLLOID GAZEWUNDAUFLAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTül® ist ein Produkt der Lipidokolloidtechnologie (TLC), die von Laboratoires URGO entwickelt wurde.

UrgoTül® ist eine nicht okklusive, flexible und anpassungsfähige Lipidokolloid Gazewundauflage, die aus einem Netz von Polyesterfasern besteht, welches mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Paraffin, Vaseline und Polymeren getränkt ist.

EIGENSCHAFTEN

In Kontakt mit dem Wundexsudat gelieren die Hydrokolloidpartikel und bilden zusammen mit dem Vaselinebestandteil des UrgoTül® eine lipidokolloide Grenzschicht. Dadurch entstehen günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess (Heilung im feuchten Milieu).

Auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung, ohne beim Anfassen fettig zu sein, verklebt UrgoTül® nicht mit der Wunde und den Wundrändern: Verbandwechsel sind schmerzfrei und atraumatisch für den Patienten.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen, feuchten Milieus
- Atraumatisches Ablösen für das neu gebildete Gewebe
- Schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten

ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTül® dient der Behandlung:

- akuter Wunden (Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden), chronischer

Wunden (Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre, diabetischer Fußgeschwüre) in der Granulations- und Epithelisierungsphase

- Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa.

Durch seine Flexibilität und sehr gute Anpassungsfähigkeit ist UrgoTül® besonders geeignet zur Abdeckung zerklüfteter Wunden oder von Wunden an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen. Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, spülen Sie die Wunde vor der Anwendung von UrgoTül® sorgfältig mit physiologischer Kochsalzlösung.

- Ziehen Sie die Schutzfolie von UrgoTül® ab.

- UrgoTül® direkt auf die Wunde auflegen.

- UrgoTül® kann mit einem sterilen Instrument zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde und die Wundumgebung anzupassen.

- UrgoTül® mit einem an das Exsudatvolumen angepassten Sekundärverband abdecken und mit einer dehnbaren Binde, einem dehnbaren Heftpflaster oder einem elastischen Schlauchverband fixieren.

- UrgoTül® wird in Abhängigkeit der behandelten Wunde und des klinischen Zustands der Wunde alle 2 bis 4 Tage gewechselt. UrgoTül® kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde belassen werden (sofern die Wundauflage zusammen mit einem Kompressionssystem zur Behandlung venöser Unterschenkelulzera verordnet wird).

- Bei der Behandlung von Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa soll die Wundauflage alle 1 bis 3 Tage gewechselt werden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- UrgoTül® haftet an chirurgischen Einmalhandschuhen aus Latex. Um die Handhabung von UrgoTül® zu erleichtern, ist es ratsam, die Handschuhe mit physiologischer Kochsalzlösung zu befeuchten.

- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auf eine antibakterielle Wundauflage umgestellt werden.

- Im Falle einer tiefen, zerklüfteten oder fistelartigen Wunde sollte UrgoTül® so positioniert werden, dass ein Teil der Wundauflage sichtbar und leicht zugänglich außerhalb der Wunde bleibt.

- UrgoTül® darf nicht in einer Überdruckkammer verwendet werden.

- Sterile Einzelverpackungen sind nur zum Einmalgebrauch bestimmt; die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionen hervorrufen.

- (*) Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Nicht anwenden, wenn diese beschädigt ist.

- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage.

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH; Justus-von-Liebig-Str.16; 66280 Sulzbach
www.urgo.de

CE 0459 (2009)  (2018-04)

STERILE R    

Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENOVE - France