

GEBRAUCHSINFORMATION

MEERWASSER NASENSPRAY SENSITIV+

- MEDIZINPRODUKT -



BITTE LESEN SIE FOLGENDE GEBRAUCHSINFORMATION AUFMERKSAM, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN DARÜBER ENTHÄLT, WAS SIE BEI DER ANWENDUNG DIESES MEDIZINPRODUKTES BEACHTEN SOLLTEN. WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN BITTE AN IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

ZUSAMMENSETZUNG:

Was ist in Meerwasser Nasenspray sensitiv+ enthalten?

1 ml Lösung enthält: 1 ml isotonische Lösung entsprechend einer 0,9%-igen Natriumchloridlösung bestehend aus Meersalzlösung, Dexpanthenol und Natriumhyaluronat (Natriumsalz der Hyaluronsäure).

HINWEIS:

Ohne Konservierungsmittel.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

Dosierspray mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase und Spülen der Nase.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Wann wird Meerwasser Nasenspray sensitiv+ angewendet?

Durch den feinen Sprühnebel ist Meerwasser Nasenspray sensitiv+ eine sanfte Hilfe für die Nasenhöhlen, Nasennebenhöhlen und die empfindliche Nasenschleimhaut.

Meerwasser Nasenspray sensitiv+ wird angewendet:

- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener Luft sowie in geheizten und klimatisierten Räumen. Meerwasser Nasenspray sensitiv+ beugt der sog. „Trockenen Nase“ vor.
- Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und Hausstaub. Die Nase kann wieder atmen und das Reinigen der Nase z. B. durch Schnäuzen wird erleichtert.
- Zur unterstützenden Behandlung von Schnupfen und Heuschnupfen.
- Zur Lösung von Verkrustungen.
- Zur Pflege und Regeneration der sensiblen Nasenschleimhaut durch Dexpanthenol und dem extra Plus an Hyaluronsäure.

GEGENANZEIGEN:

Wann dürfen Sie Meerwasser Nasenspray sensitiv+ nicht anwenden?

Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

Darf Meerwasser Nasenspray sensitiv+ in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Es besteht bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kein Hinweis auf ein besonderes Risiko während der Schwangerschaft und Stillzeit.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND BESONDERE HINWEISE:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Nach Nasenoperationen oder Unfällen sollte vor der Anwendung der Rat des Arztes eingeholt werden.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Meerwasser Nasenspray sensitiv+ anwenden?

Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße (0,14 ml je Sprühstoß) in jedes Nasenloch geben und dabei leicht durch die Nase einatmen.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen Schnupfenspray sollten Sie Meerwasser Nasenspray sensitiv+ vorher anwenden.

Wie lange sollten Sie Meerwasser Nasenspray sensitiv+ anwenden?

Bei Bedarf kann Meerwasser Nasenspray sensitiv+ bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden.

HINWEIS ZUR ANWENDUNG:

Vor der ersten Benutzung die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und das Spraysystem mehrmals betätigen. Bei Austritt eines gleichmäßigen Sprühnebels ist das Produkt einsatzbereit. Die Flasche bei Benutzung möglichst senkrecht halten. Trotz des speziellen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen. Nach der Anwendung empfiehlt sich daher auch, den Nasenadapter abzuwaschen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis.

Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.

NEBENWIRKUNGEN:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES MEDIZINPRODUKTES:

Meerwasser Nasenspray sensitiv+ darf nur bis zu dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel mit  „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch sollten Sie Meerwasser Nasenspray sensitiv+ nicht länger als 6 Wochen verwenden.

Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C lagern.



MEERWASSER NASENSPRAY SENSITIV+ FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!



DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:

WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid
T +49 (0)2624 107-361
www.wepa-dieapothekenmarke.de



Hersteller:
Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestr. 6
D-52457 Aldenhoven

112346
Stand der
Information: 03/2014

