

## Wasserdichte Klebefolie zur Anwendung auf intakter Haut

DracoFixiermull waterproof ist eine transparente und wasserfeste Klebefolie zur Befestigung von primären Wundauflagen wie z.B. DracoFoam oder Kompressen. DracoFixiermull waterproof kann im ärztlichen oder häuslichen Umfeld verwendet werden.


## Indikationen:

Wasser- und bakteriendichte Verbandfixierung zur Versorgung chronischer und akuter Wunden.

nwendung entsprechend der nachfolgenden Empfehlung und Anleitung auf der Trägerfolie oder der ärztlichen Anweisung.



sauberen mit benötigte Größe von der Folienrolle **DracoFixiermull** waterproof ab. Beachten Sie dabei, dass die gesamte Wundauflage später mit der Folie abgedeckt ist und ein großzügiger, umlaufend geschlossener Klebe-Kontakt zur Haut besteht (mind. 2 cm).

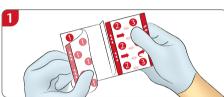

des Folienstücks nun der Rückseite



Platzieren Sie den klebenden Teil der Folie so auf Haut r Wundauf-



Lösen Sie nun den zweiten Teil der Schutzfolie. greifen Sie die kleine umgeknickte Lasche und ziehen die gesamte Folie (2) faltenfrei in Pfeilrichtung bis zur weißen Linie ab. Drücken Sie jetzt die gesamte Folie, insbesondere auch am Rand, faltenfrei an.



Jetzt muss noch der obere Teil der Schutzfolie entfernt werden: Dazu schlagen Sie den freihängenden Folie um und ziehen ihn in Pfeilrichtung ③ – ü Teil der - über den weißen Balken hinweg – komplett zurück.

- Wechselintervall
- entsprechend der Primärwundauflage,
  wenn Exsudat seitlich aus der Auflage austritt,
  wenn der Verband beschädigt ist.



## Weitere Hinweise

DracoFixiermull waterproof hat einen starken Kleber, der nur bedingt für Patienten mit besonders sensibler und/oder fragiler (Wundumgebungs-) Haut geeignet ist. Eine Anwendung von **DracoFixiermull waterproof** kann bei den entsprechenden Personen unter Umständen Hautirritationen und Verletzungen hervorrufen. Patienten mit sensibler und/oder fragiler (Wundumge-bungs-) Haut wird daher empfohlen, vor Anwendung Haut Anwendung

des Produkts ihren Arzt oder Apotheker zu konsultierer

Sollten während der Anwendung von **DracoFixiermull** waterproof Schmerzen oder Komplikationen wie allergische Reaktionen und/oder Hautreizungen (z.B. Juckreiz, Rötungen) auftreten, so ist der Verband men und ein Arzt über die Umstände zu informieren. Zudem ist ein Arzt aufzusuchen, wenn die Wunde nicht

innerhalb weniger Tage Heilungstendenzen zeigt. Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

DracoFixiermull waterproof ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Be-schaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Pa-tienten, Anwenders oder anderer Personen; schwertienten, Anwenders oder anderer Personen; schwer-wiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut

für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden. waterproof kann nach dem Ge-DracoFixiermull brauch über den Hausmüll entsorgt werden.













Rev.: 211207RW-13250-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.c