



WEPA.shop



WEPA Flächen-Desinfektion 500 ml mit Sprühkopf

Artikel-Nr. 040198

Schnelldesinfiziens auf Alkoholbasis für Medizinprodukte, sonstige Flächen und Gegenstände mit umfassendem Wirkspektrum: Bakterizid*, levurozid*, begrenzt viruzid (bei behüllten Viren inkl. Coronavirus), Rota-, Noro-, Adenovirus.

*zertifiziert vom VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V.



BESCHREIBUNG

Schnelldesinfiziens auf Alkoholbasis für Medizinprodukte, sonstige Flächen und Gegenstände mit umfassendem Wirkspektrum: Bakterizid*, levurozid*, begrenzt viruzid (bei behüllten Viren inkl. Coronavirus), Rota-, Noro-, Adenovirus.

*zertifiziert vom VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V.

Anwendung:

Unverdünnt anwenden! Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m²). Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C.

Nicht für alkoholempfindliche Materialien (Lackierungen, Beizungen, Plexiglas u.a.) geeignet. WEPA Flächendesin-

fektion auf die zu desinfizierende Fläche geben, mit einemsauberen Tuch verteilen und das Präparat bis zur Abtrocknung einwirken lassen (empfohlene Einwirkzeit: 1 Minute). Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Empfohlene Einwirkzeiten:

- begrenzt viruzid** inkl. HBV/HCV/HIV konz. 30 Sek. (**gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 03/2017)
- Rota-, Adeno- und Norovirus (MNV) konz. 30 Sek.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 70 g Ethanol (vergällt)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

MERKMALE

Anwendung	Desinfektion
Darreichungsform	Lösung
Inhaltsstoffe	Ethanol
Inhalt (ml)	500
PZN	14370462
Verpackungseinheit	10