



Jäcklin
MEDICAL

| | |
|------------------|---|
| Marken Name: | Jäcklin Medical |
| Produkt Typ: | JM21 – FFP2 NR Atemschutzmaske, 5-lagig |
| Klassifizierung: | FFP2 NR |
| Produkt Code: | JM21 |

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwendungszweck:

Die Filtermaske ist eine PSA der Schutzklasse FFP2, die in vielen Bereichen einsetzbar ist, in denen Personen gesundheitsschädlichen Stäuben auf Wasser- und Ölbasis oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 ausgesetzt sind (Allgemeiner Grenzwert = 10-fach).

Haltbarkeit: 2 Jahre

Lagerung:

1. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen Umgebung, abseits von kontaminierten und feuchten Orten.
2. Beim Transport sollten die Produkte geschützt werden vor Aufprall und Druck, versuchen Sie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Benutzeranleitung:

1. Öffnen Sie die Maske mit den Fingern und biegen Sie den Nasenbügel leicht, so dass die Maske beim Tragen gut auf dem Nasenbein aufliegen kann.
2. Platzieren Sie die Maske über Nase und Mund und ziehen Sie die Ohrenbänder hinter die Ohren.
3. Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen genau an das Nasenbein an und ziehen Sie die Ohrenbänder in Position, um einen dichten und sicheren Sitz zu gewährleisten.
4. Stellen Sie sicher, dass die Maske abdichtet. Hierfür umschließen Sie die Maske mit beiden Händen und atmen Sie abrupt aus. Im Falle von Leckage passen Sie den Sitz von Maske und Nasenbügel an. Sollte die Maske keinen dichten Sitz auf dem Gesicht erlangen, darf ein Gefahrenbereich nicht betreten werden.

Empfehlung zu Tragedauer:

1. Nach einer durchgehenden Tragedauer von 75 Minuten wird eine Tragepause von 30 Minuten empfohlen.
2. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Maske um ein Einmalprodukt handelt.
3. Bei Durchfeuchtung der Maske sollte diese entsorgt werden. Auch nach einer Gesamttragedauer von 8 Stunden sollte die Maske entsorgt werden.
4. Bei kurzen Trageintervallen sollte die Maske so gelagert werden, dass sie gut trocknen kann und keine Gegenstände kontaminiert werden.

Warnhinweise:

Überzeugen Sie sich stets, dass die verwendete Maske folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:

- für die Anwendung geeignet sein.
- korrekt sitzen.
- während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden.
- bei Bedarf ausgetauscht werden.

Eine sachgemäße Auswahl, Schulung und Nutzung sind immer Voraussetzung, damit das Produkt den Träger vor Schadstoffen aus der Luft schützen kann. Befolgen Sie diese Gebrauchshinweise stets ordnungsgemäß. Wenn die PSA nicht die ganze Zeit während der Schadstoffbelastung getragen wird, so kann dies für den Träger gesundheitsschädliche Folgen, bis zur Invalidität, nach sich ziehen.

Richten Sie sich in Bezug auf Eignung und sachgemäße Nutzung der PSA immer auch nach den geltenden örtlichen Vorschriften.

Entsorgung:

Berühren Sie nie die Vorderseite des Produkts, wenn Sie es abnehmen. Dies kann dazu führen, dass Hände kontaminiert und die Maske während des Tragens von viralen Partikeln besetzt wird. Alle aufgeführten Produkte sind nur zur einmaligen Nutzung geeignet und sollten nach dem Tragen sofort entsorgt werden. Teilen Sie sich nie ein Produkt mit einer anderen Person, da womöglich ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.

Waschen Sie Ihre Hände! Nach jeder Abnahme eines Gesichtsschutzes sollten Sie Ihre Hände gründlich reinigen.

Hersteller: Jäcklin GmbH

Produktions Adresse: Unterer Talweg 50, 86179 Augsburg, Deutschland

Telefon Hersteller: +49 821 808470, www.jaecklin-medical.de
