Coloplast GmbH Kuehnstraße 75 D-22045 Hamburg www.coloplast.de Manufacturer Distributor

Coloplast 🖶

www.coloplast.com

Holtedam 1 3050 Humlebæk Coloplast A/S



סימנשוו - ואח סכיושמו ואפואשו וחפ דווור ואמאוסופו ו

Stand: September 2006 Gebrauchsanweisung

© Coloplast and Biatain are registered trademarks of Coloplast A/S or related companies. © 2006-09. All rights reserved.

Manufacturer: Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.











Biatain - Ibu Coloplast



Deutsch

Biatain - Ibu Schaumverband mit Ibuprofen, sanft-haftend Biatain - Ibu Schaumverband mit Ibuprofen, nicht-haftend

Der Verband muss jeweils mit der unbedruckten Seite auf die Wunde appliziert werden. 1. Biatain - Ibu Schaumverband mit Ibuprofen, nicht-haftend

ten Seite auf die Wunde. 2. Biatain - Ibu Schaumverband mit Ibuprofen, sanft-haftend Entfernen Sie die Schutzfolie und applizieren Sie den Verband jeweils mit der unbedruck:

Beschreibung

Biatain - Ibu sind sterile Polyurethan-Schaumverbände, die homogen verteiltes Ibuprofen (0,5mg/cm²) enthalten. Die Verbände schaffen ein feuchtes Wundheilungsmilieu und sorgen für ein effizientes Exsudatmanagement. Ibuprofen wird durch Kontakt mit Wundexsudat in die Wunde freigesetzt. Die Freisetzung ist abhängig von der Exsudatmenge

nach außen hin ab und bildet eine Barriere gegenüber Bakterien. Eine wasserdichte, semipermeable Folie schließt die **Biatain - Ibu** Schaumverbände

Biatain - Ibu Schaumverband sanft-haftend hat eine hautfreundliche leicht-haftende Beschichtung, die den Verband fixiert, während ein Sekundärverband angelegt oder entfernt Der nicht-haftende **Biatain - Ibu** Schaumverband ist besonders für die Anwendung bei empfindlicher Haut im wundumgebenden Bereich geeignet.

wird oder eine Kompressionstherapie durchgeführt wird.

Biatain - Ibu Schaumverbände sind zur Behandlung von exsudierenden Wunden bestimmt, wie z.B. Ulcus cruris und Dekubitus, Läsionen beim Diabetischen Fußsyndrom, kleinere Brandwunden bis Grad Ila, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen. Voraussetzung ist, dass die Wunde keine tieferen Schichten als die Haut betrifft (z. B. Knochen, Sehnen, Muskeln).

Biatain - Ibu Schaumverbände können unter Kompressionsverbänden angewendet

durch Gewebeschädigung bedingte Wundschmerzen reduzieren. **Biatain - Ibu** Schaumverbände schaffen ein feuchtes Wundheilungsmilieu und könner

Anwendungshinweise

Biatain - Ibu Schaumverbände können je nach Exsudatmenge und Zustand eines etwa-igen Sekundärverbandes bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.

1.200 cm² verwendet werden (z.B. 3 Verbände der Größe 20x20 cm). Der Verband sollte nicht mehr als zweimal täglich gewechselt werden, was einer maximalen täglichen Anwendung von 2.400 cm² Gesamt-Verbandfläche entsprechen würde. Diese Obergrenze gilt auch dann, wenn mehr als eine Wunde mit **Biatain - Ibu** Schaumverbänden versorgt Biatain - Ibu Schaumverbände können bis zu einer Gesamt-Verbandfläche von

Biatain - Ibu Schaumverbände können solange angewendet werden, wie es klinisch

Spülen Sie die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder sterilem Wasser. Trocknen Sie die Wundumgebung vorsichtig. Bei Bedarf schützen Sie die wundumgebende Haut mit einem Schutzfilm oder einem anderen Hautschutz.

Nehmen Sie Biatain - Ibu Schaumverbände aseptisch aus der Verpackung. Berühren Sie nicht die unbedruckte Seite des Schaumes!

Für eine optimale Anwendung der **Biatain - Ibu** Schaumverbände wählen Sie die Verbandgröße so, dass an allen Wundrändern mindestens 2 cm des Verbandes überstehen. Applizieren Sie das Produkt mit der weißen, unbedruckten Seite auf die Wunde.



geeignete Kompressionsmittel fixiert werden. Biatain - Ibu Schaumverbände müssen mit einem Sekundärverband oder durch

Aufbringen auf die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder sterilem Wasserbefeuchtet werden. Bei schwach exsudierenden Wunden können **Biatain - Ibu** Schaumverbände vor dem

Gegenanzeigen

dürfen nicht mit Biatain - Ibu Schaumverbänden behandelt werden. Wunden, die tiefere Schichten als die Haut betreffen (z.B. Knochen, Sehnen, Muskeln),

Hautreaktionen aufgetreten sind. Biatain - Ibu Schaumverbände dürfen nicht angewendet werden bei Patienten mit der Vergangenheit Reaktionen wie Asthmaanfälle, Nasenschleimhautentzündungen oder bekannter Uberempfindlichkeit gegen Ibuprofen oder einen sonstigen Inhaltsstoff, Ace-byksalicylsäure oder andere nicht steroidale Entzundungshemmer, insbesondere wenn in

Bei Verdacht auf eine allergische Reaktion kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt und die Colopast GmbH zwecks weitergehender Informationen.



Schwangerschaft Verwenden Sie Biatain - Ibu Schaumverbände nicht während einer

Verwenden Sie **Biatain - Ibu** Schaumverbände nicht bei Kindern unter 12 Jahren, es sei denn auf ausdrückliche Verordnung eines

rerer Verbände nicht überschritten werden. Die unter Anwendungshinweise angegebene Obergrenze darf auch bei Anwendung meh

Sicherheitshinweise

gen wie z.B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid. Verwenden Sie Biatain - Ibu Schaumverbände nicht zusammen mit oxidierenden Lösun

genaufnahmen, Ultraschall, Diathermie, Mikrowellen oder MR-Tomographie). Entfernen Sie Biatain - Ibu Schaumverbände vor Strahlenbehandlungen (wie z.B. Rönt-

Zum Einsatz anderer Spüllösungen als physiologischer Kochsalzlösung oder sterilem Wasser in Kombination mit **Biatain - Ibu** Schaumverbänden liegen keine Erkenntnisse

diabetische Wunden, sollten regelmäßig von Arzt und Pflege inspiziert und behandelt werden. Infizierte Wunden sowie Wundrose (Erysipel) bedürfen einer speziell dafür Wunden, die ausschließlich oder hauptsächlich auf arterieller Insuffizienz beruhen, sowie

Sonstiges

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nur zur äußeren Anwendung.

Lagerung



Biatain - Ibu Schaumverbände sollten maximal bei Raumtemperatur gelagert werden.

Biatain - Ibu Schaumverbände sollten horizontal gelagert werden.



Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden





Nicht zur Wiederverwendung.

Bei beschädigter Verpackung darf das Produkt weder verwendet noch erneut sterilisiert werden

Work Order (WO)Die Work Order kennzeichnet die Verpackung einer spezifischen Bestellung (die LOT-Nummer bezieht sich hingegen auf den Produktionslauf der Produkte).

			1