

ALLEVYN^o GENTLE

Sanft haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Gel-Beschichtung

Inhalt aus bereits geöffneten oder beschädigten Verpackungen nicht verwenden.

Beschreibung

Der Wundverband ALLEVYN Gentle ist dreilagig aufgebaut - eine Kombination aus einem absorbierenden hydrozellulären Schaumstoffkern, eingeschlossen zwischen einer perforierten, weichen, gelbeschichteten Wundkontaktschicht und einer hoch atmungsaktiven und wasserdichten Außenschicht.

Wirkungsmechanismus

Die dreilagige Konstruktion von ALLEVYN Gentle ermöglicht ein dynamisches Flüssigkeitsmanagement, um hierdurch ein optimal feuchtes Wundmilieu bereitzustellen. Die Konsequenz: Förderung einer schnelleren Wundheilung und ein verringertes Risiko für das Auftreten einer Mazeration der angrenzenden Hautareale. Die Wundkontaktfläche von ALLEVYN Gentle ist mit einer weichen Gelschicht versehen, die die Applikation einer sekundären Fixierung erleichtert und die bei Verbandswechseln eine atraumatische Entfernung gewährleistet. ALLEVYN Gentle lässt sich leicht anlegen und wieder entfernen.

Anwendungsgebiete

Behandlung von flachen granulierenden Wunden. Chronische und akute exsudierende Wunden, tiefe und oberflächliche Wunden wie Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, infizierte Wunden, maligne Wunden, OP-Wunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Transplantationswunden, Hautrisse, exulzierende Läsionen. Kann bei nekrotischen oder schorfigen Wunden zusammen mit INTRASITE^o Gel eingesetzt werden. ALLEVYN Gentle ist für die Wundversorgung bei empfindlicher Haut geeignet.

Anwendungshinweise

1. Die Wunde in üblicher Weise reinigen.
2. Verband in geeigneter Größe auswählen.
3. Die Wunde umgebende Haut reinigen, entfetten und trocknen. Haarbewuchs sollte zurückgeschnitten werden, um engen Kontakt zur Wunde sicherzustellen.
4. Unter aseptischen Verfahren das Schutzpapier von ALLEVYN Gentle abziehen und die haftende Seite auf die Wunde auflegen. Hierbei sicherstellen, dass rundum guter Kontakt zur Wunde besteht. Den Wundverband mit einer Fixierfolie wie z. B. OPSITE^o Flexifix, mit Pflaster oder Binde sichern.

5. Zur Anpassung an schwer zu versorgende Körperstellen kann ALLEVYN Gentle zugeschnitten werden. Beim Zuschneiden des Wundverbands müssen immer aseptische Verfahren eingehalten werden.

6. ALLEVYN Gentle kann angehoben und erneut in Position gebracht werden, ohne hierdurch seine Hafteigenschaften zu verlieren.

7. ALLEVYN Gentle kann unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zusammen mit anderen Behandlungsmethoden wie z. B. einer Kompressionstherapie genutzt werden. Unter einer Kompressionsbehandlung muss der Wundverband auf die Größe der Wunde zugeschnitten werden. Außerdem ist vor dem Anlegen der Kompressionsverbände darauf zu achten, dass sich der Wundverband in Position befindet.

Häufigkeit des Verbandwechsels

Während der Frühstadien der Wundversorgung sollten ALLEVYN Gentle Wundverbände häufig kontrolliert werden. Bei Anwendung auf infizierten Wunden muss die Überprüfung und Behandlung der Infektion gemäß lokalen klinischen Protokoll durchgeführt werden. Verbände können bis zu 7 Tage lang auf der Wunde belassen werden oder bis Exsudat sichtbar wird und bis zu einem Abstand von 1,5 cm zum Rand des Wundverbands vorgedrungen ist (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Auch hierbei sind die lokalen klinischen Protokolle zu berücksichtigen. Die äußere Folienschicht bietet eine Barriere gegen von außen eindringende Bakterien und ist zudem wasserdicht.

Entfernen des Verbandes

Zum Abnehmen von ALLEVYN Gentle werden die Fixierfolie oder die Binde entfernt und der Verband von der Wunde abgehoben.

Vorsichtsmaßnahmen

ALLEVYN Gentle Wundverbände dürfen nicht mit oxidierenden Substanzen wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid genutzt werden, da diese die absorbierende Polyurethan-Komponente des Verbandes zersetzen können. Bei Einsatz im Rahmen der Kompressionsbehandlung könnte ALLEVYN Gentle aus seiner Position geraten, wenn es bei der betroffenen Gliedmaße zu einem schnellen Abklingen des Ödems kommt. Anwendung abbrechen, wenn Rötungen oder Sensibilisierungen auftreten.

Handelsformen

Best.-Nr.	Abmessung	Stck./Pkg.
66800242	5cm x 5cm	5
66800243	10cm x 10cm	5
66800244	10cm x 20cm	5
66800245	15cm x 15cm	5
66800246	20cm x 20cm	5

Hersteller Smith & Nephew Medical Ltd, Hull HU3 2BN England. Smith & Nephew GmbH, Wound Management, Max-Planck-Str 1-3, D-34253 Lohfelden.
Tel: 0 561 9514 0. *Warenzeichen von Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2007



Sanft haftend

STERILE R



Anzahl der Verbände

Wundverband mit haftender Gel-Beschichtung

Gamma sterilisiert

Für mäßig bis stark exsudierende Wunden

Nur zur einmaligen Benutzung

Trocken lagern (<25°C)

Bitte Beipackzettel beachten

Vor direktem Sonnenlicht schützen