

Wie wirken Snoreeze Gaumen-Streifen?

Snoreeze Gaumen-Streifen wirken gegen die Hauptursachen des Schnarchens. Sie befeuchten die Schleimhaut im hinteren Rachen und geben ihr Spannung.

Die Spherulite®Micro-Kapsel-Technologie sorgt für eine langsame und lang anhaltende Freisetzung der Inhaltsstoffe. Bis zu 8 Stunden.

Die Anwendung von Snoreeze Gaumen-Streifen ist einfach



1

Legen Sie einen Snoreeze Gaumen Streifen an den Gaumen.



2

Er löst sich dort sofort auf und verteilt sich angenehm wie ein Film im Rachenbereich.

v1.1

Zusammensetzung

Pectin (aus Äpfeln), Wasser, Glycerin, Pfefferminzöl, Zellulose, Sorbitanstearat, Polysorbat 60 Tocopherolacetat (Vitamin E), Menthol (aus Pfefferminze), Aspartam*, Kaliumsorbat, Natriumsaccharin, Acesulfam K, Hyaluronsäure, Guarkernmehl, Zitronensäure, CI 42090.*)
Phenylalaninquelle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.snoreeze.de



PZN 10188217



0459